

## Incontinentie hooslaken

Het incontinentie hooslaken is een hulpmiddel dat speciaal ontwikkeld is voor cliënten die hun incontinentiemateriaal uit bed verwijderen en/of uittrekken. Door middel van de lange katoenen instopstrook en sterk elastiek blijft het hooslaken beter om het matras zitten. Het incontinentiemateriaal ligt hierdoor altijd goed onder de cliënt en er ontstaat minder plooivorming..

Door het absorptievermogen wordt de cliënt niet of minder nat en de huid zal minder snel verweken. Het hooslaken heeft een comfortabele stof, een rustig uiterlijk en is geheel matras omsluitend.

### Afmeting:

85/90 x 200/210 centimeter

### Materialen:

Non-woven polyester,  
Trilobol polyester, Polyurethaan

### Wassen:

- \* Wassen tot maximaal 60°
- \* Drogen op lage temperatuur
- \* LET OP!! Om blijvende vlekken door bloed of ontlasting te voorkomen adviseren we om maximaal tot 60°C te wassen
- \* GEEN bleekmiddelen, wasverzachtors of andere chemische toevoegingen gebruiken

### LET OP!!:

- \* Droogt langzaam, daarom aangeraden om een set (2 stuks) aan te schaffen
- \* De lichtblauwe incontinentiestof is de BOVENKANT

### TIPS:

- \* Om de droogtijd van het hooslaken te versnellen kunt u het hooslaken een extra keer centrifugeren
- \* Eventuele urinevlekken en/of urinegeur kunt u eenvoudig verhelpen door het hooslaken in te sprayen met Uri-Go



### Voordelen:

- \* Zachte en prettige stof om op te liggen.
- \* Hoog acceptatievermogen door de cliënt.
- \* Absorptievermogen van ruim 4 liter
- \* Lange katoenen instopstrook, waardoor hooslaken beter om het matras blijft zitten.
- \* Huid van de cliënt wordt beter beschermd
- \* Verminderd risico op valgevaar

### Kenmerken:

- \* De bovenlaag bestaat uit meerdere lagen voor het absorberen van vloeistof/urine
- \* Het hooslaken wordt rechtstreeks om het matras gedaan